

Information für Transplantationszentren

zum Aufruf der Falldaten der Maschinenperfusion aus der ORS-Cloud

WICHTIG: Falldaten der Maschinenperfusion aus der ORS-Cloud können nur beim Aufruf der Spende über das Cockpit Transplantationszentrum im DSO.isys web abgerufen werden! Dies setzt voraus, dass der Nutzer eine Zugriffsberechtigung für das Transplantationszentrum im DSO.isys web besitzt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre DSO-Region.

Beim Aufruf über das *Schnellzugriffsverfahren für Organangebote* wird der entsprechende Link nicht angezeigt, da DSO.isys web in diesem Fall die Zugehörigkeit des Users zum Transplantationszentrum nicht prüfen kann.

- Für jede Maschinenperfusion wird in der ORS-Cloud ein Fall erzeugt.
- Hat ein Transplantationszentrum (TxZ) ein Organangebot akzeptiert, kann es über das Cockpit *Transplantationszentrum* die Spende öffnen. [1]

The screenshot shows the TX-Zentrum Cockpit interface. At the top, there is a header with 'TX-Zentrum Cockpit' and a search bar containing 'D0218362'. Below the header, there is a logo for 'XSO. ET-TEST Transplantationszentrum'. The main area displays a table titled 'Offene Organangebote' (Open Organ Offers). The table has columns for D-Nr, ET-Nr Spender, Alter, Blutgr., Spenderregion, ET-Nr Empfänger, Organe, and Frühestes Akzeptanz-Zeitpunkt. One row is visible, showing D-Nr D0218362, Spender Alter 65, Blutgr. 0, Spenderregion Region Nord, Empfänger LKI, and Frühestes Akzeptanz-Zeitpunkt (empty).



Abbildung 1

- Bei laufender Maschinenperfusion und nach Eintragung der Seitenwahl durch Eurotransplant wird im Cockpit *Spender-TxZ* ein Link zu dem ORS-Fallreport angezeigt. [2]

The screenshot shows the Spender-TxZ Cockpit interface. At the top, there is a header with 'D0218362' and a search bar containing 'D0218362'. Below the header, there is a logo for 'XSO. ET-TEST Transplantationszentrum'. The main area displays a table with columns for 'sisdaten', 'Medizinische Eignung', 'Labor', 'OP-Entnahme', and 'Vermittlung'. On the right side, there is a section titled 'Statusinformationen' (Status Information) which includes fields for Aufnahme (01.12.2025 00:00), ET-Meldung (04.12.2025 12:10), MP indiziert (indicated by a green icon), OP (geplant) (04.12.2025 13:00), Cross-clamp time (04.12.2025 12:00), and 'Link zur Maschinenperfusion'. A red arrow points from the text 'Link zu ORS-Fallreport' to the 'Link zur Maschinenperfusion' link. There is also a red arrow pointing to the 'DSO_LKT_002' link.

Abbildung 2

- Der ORS-Fallreport ist ein PDF-Dokument, welches alle Daten von Beginn des Falls bis zum Zeitpunkt des Aufrufs anzeigt. Dieses Dokument wird bei jedem Aufruf mit aktualisierten Daten neu erstellt. [3]

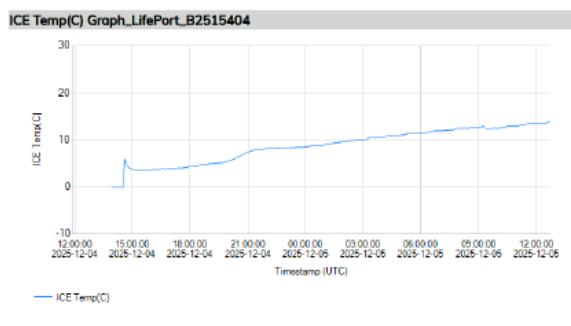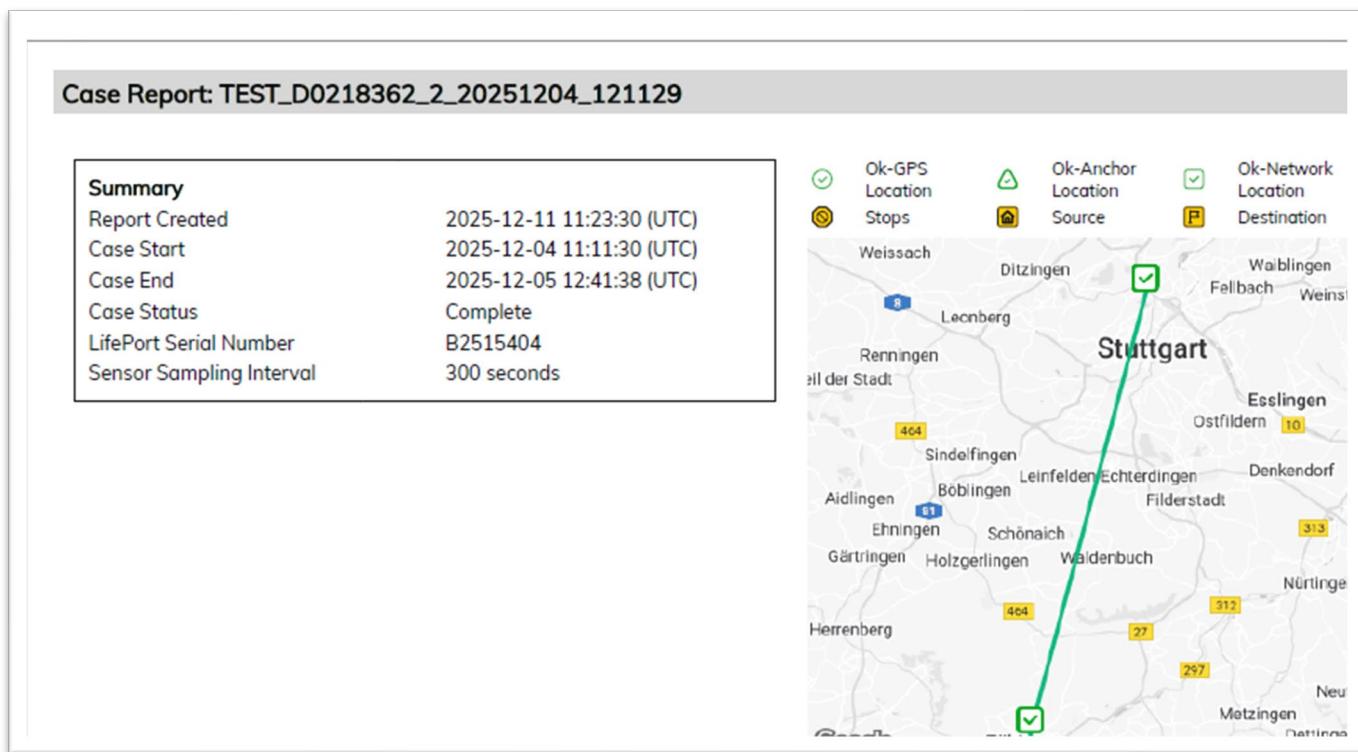

Time (UTC)	Error	Organ ID	Kidney Side	ICE Temp (C)	Trap Temp (C)	Renal Res (mmHg / min)	Flow Rate (ml/min)	Systolic Pressure (mmHg)	Diastolic Pressure (mmHg)	LifePort Battery (%)	GPS Battery (%)	Latitude	Longitude
2025-12-04 15:28:30	No Error	196547	Left	3.6	11.1	1.47	17	29	20	94	99	48.81291623	9.1754593
2025-12-04 15:32:22	No Error	196547	Left	3.6	11	1.38	18	30	20	94	99	48.81277247	9.17595216
2025-12-04 15:36:24	No Error	196547	Left	3.6	10.7	1.31	19	29	21	94	99	48.81277247	9.17604668
2025-12-04 15:40:26	No Error	196547	Left	3.6	10.5	1.31	19	30	21	94	99	48.81277291	9.17595277
2025-12-04 15:44:27	No Error	196547	Left	3.6	10.5	1.31	19	29	19	94	99	48.81277247	9.17604668
2025-12-04 15:49:20	No Error	196547	Left	3.6	10.3	1.38	18	30	20	94	99	48.81286017	9.17580497
2025-12-04 15:55:23	No Error	196547	Left	3.6	10.3	1.56	16	30	21	94	99	48.81277276	9.1759621
2025-12-04 15:59:25	No Error	196547	Left	3.6	10.1	1.44	18	31	21	94	99	48.81291623	9.1754593
2025-12-04 16:03:27	No Error	196547	Left	3.7	10.1	1.38	18	30	20	94	99	48.81286017	9.17580497
2025-12-04 16:07:29	No Error	196547	Left	3.7	9.7	1.38	18	30	20	94	99	48.81277236	9.17591848
2025-12-04 16:13:29	No Error	196547	Left	3.7	9.8	1.38	18	30	20	94	99	48.81277236	9.17591848
2025-12-04 16:18:21	No Error	196547	Left	3.7	9.6	1.41	17	28	20	94	99	48.81291623	9.17594593
2025-12-04 16:24:25	No Error	196547	Left	3.7	9.6	1.38	18	30	20	94	99	48.81273887	9.17594929
2025-12-04 16:28:27	No Error	196547	Left	3.7	9.4	1.47	17	29	20	94	99	48.81273271	9.1759306
2025-12-04 16:32:29	No Error	196547	Left	3.8	9.3	1.25	20	30	20	94	99	48.81291623	9.17574593
2025-12-04 16:36:41	No Error	196547	Left	3.8	9.4	1.31	19	29	20	94	99	48.81273887	9.17594929
2025-12-04 16:41:22	No Error	196547	Left	3.7	9.1	1.2	20	30	19	94	99	48.81291623	9.17574593
2025-12-04 16:47:37	No Error	196547	Left	3.8	9.2	0.18	87	15	11	94	99	48.81286017	9.17580497
2025-12-04 16:51:39	No Error	196547	Left	3.8	9	1.33	18	29	19	94	99	48.81274199	9.17594133
2025-12-04 16:56:41	No Error	196547	Left	3.8	9	1.33	18	29	20	94	100	48.81280831	9.17639947
2025-12-04 17:00:23	No Error	196547	Left	3.8	8.9	1.5	16	29	19	94	99	48.81277236	9.17591848
2025-12-04 17:06:37	No Error	196547	Left	3.9	9	1.2	20	29	20	94	99	48.81277247	9.17604668
2025-12-04 17:10:38	No Error	196547	Left	3.9	8.8	1.38	18	30	20	94	100	48.81277213	9.17596472

